

# ZEHENSCHUTZ mit EPITHELIUM 26®

## INDIKATION

Verhindert und lindert Schmerzen am Ende des Zehs: Hühnerauge am Ende des Zehs, blauer Nagel, eingewachsener Nagel...

## GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arteriitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Ulcera: fragen Sie Ihren Arzt, und beobachten Sie Ihren Fuß während der Verwendung.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Für ein einfaches Anbringen drehen Sie den Zehenschutz auf links und bringen ihn an der Finger- oder Zehenspitze an und rollen diesen ab.
- Den Zehenschutz nicht kürzen, dies schadet seiner Strapazierfähigkeit.
- Nehmen Sie den Zehenschutz jeden Abend ab, um die Bildung von Feuchtigkeit zu vermeiden.

## EIGENSCHAFTEN

- EPITHELIUM 26® ist ein von Podologen patentiertes Silikongel, dessen Eigenschaften der Druckverteilung jenen des Unterhautgewebes ähnlich sind. Die Verwendung dieses Materials im Zehenschutz ermöglicht es, die Bildung von Hühneraugen an den Zehenspitzen zu verhindern und den Schmerz zu lindern, wenn bereits Schwielenhaut entstanden ist.

Außerdem ist der Zehenschutz auch sehr effizient um blaue Nägel oder eingewachsene Nägel vorzubeugen.

- Der Einsatz von EPITHELIUM 26® Gel zwischen zwei Gewebeschichten erhöht die Lebensdauer des Zehenschutzes.

## REINIGUNG

- Von Hand waschen, nicht reiben.
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

**ZUSAMMENSETZUNG:** 62% Silikon, 38% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2001.



Von Hand waschbar.



Nicht bügeln  
(kein Dampf).



Nicht chemisch  
reinigen.



Bleichen mit Chlor  
nicht erlaubt.



Nicht  
maschinentrocknen.



**LOT** Siehe Verpackung.