

FLEXIBLE DAUMENBANDAGE aus EPITHELIUMFLEX®

INDIKATION

Zur Linderung von Gelenkschmerzen am Daumenansatz (Rhizarthrose), indem passive Mikrobewegungen eingeschränkt werden.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Im Fall eines schweren Ödems: die Hand während der Verwendung beobachten. Die Bandage abnehmen, wenn sie zu eng wird und die Durchblutung behindert. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Dieses Produkt wird tagsüber getragen.
- Erhältlich in zwei Versionen: für die rechte und linke Hand (die Naht muss sich an der Handinnenseite befinden).
- Nicht in der Nähe einer Flamme oder eines glühenden Gegenstandes verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Die EPITACT® Flexible Daumenbandage ermöglicht es, eine ganzheitliche Funktionalität der Hand über den gesamten Tag zu erhalten. Sie ergänzt starre Schienen, die besser für den nächtlichen Gebrauch geeignet sind.

ANZIEHEN DER BANDAGE

Die Bandage über die Hand ziehen und den Daumen in die dafür vorgesehene Daumenöffnung schieben. Die Naht muss sich an der Handinnenseite befinden. Für optimalen Komfort kann die Position der Bandage angepasst werden, indem die Naht leicht nach links oder rechts verschoben wird.



PFLEGE

- Maschinenwäsche 30°C.
- Kein Fleckenmittel verwenden (Azeton, Lösemittel, usw.).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 86% Polyamid/Elasthan, 14% Silikon.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2013.



Maschinenwäsche
30°C.



Nicht bügeln
(kein Dampf).



Nicht chemisch
reinigen.



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.



Nicht
maschinentrocknen.



LOT Siehe Verpackung.