

## FUßSOHLENKISSEN aus Epithelium 26®

### INDIKATION

Zur Vorbeugung und Linderung von Vorfuß-Schmerzen.

### EIGENSCHAFTEN

- Epithelium 26® ist ein echter, von Podologen patentierter «Fußballenersatz». Durch seine mechanischen Eigenschaften ersetzt dieses Silikongel tatsächlich die fehlende natürliche Funktion des Fußballens, deren Fehlen die Ursache der Schmerzen ist: Es verteilt das Körpergewicht auf den gesamten Trittbereich.
- Die Anwendung von Epithelium 26® im Bereich der Fußsohlen ermöglicht durch die Ballenpolster eine effiziente Schmerzlinderung.

### ANWENDUNG

- Direkt auf der Haut tragen.
- Die bedruckte Seite des Gewebes muss in Kontakt mit der Fußsohle haben. Nicht umdrehen.
- Schieben Sie den Fuß auf das Ballenpolster und platzieren Sie die Halteschleife zwischen der großen und der zweiten Zehe.
- Für optimalen Tragekomfort nicht barfuss tragen, sondern Strümpfe darüber ziehen.

### REINIGUNG

- In der Waschmaschine bei 40°C im mitgelieferten Wäschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

### ZUSAMMENSETZUNG

80% Silikongele. 20% Polyamid/Elasthan-Stoff.

### GEGENANZEIGEN

- Dieses Produkt wurde allen Tests gemäß der Norm ISO 10993-1 unterzogen. Sollte dennoch eine allergische Reaktion auftreten, wenden Sie das Produkt nicht mehr an und informieren Sie MILLET Innovation.
- Nicht auf einer offenen Wunde anwenden.
- Personen, die an Arterienentzündungen, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten oder Veneninsuffizienz leiden: Wenden Sie das Produkt nie auf einer offenen Wunde an. Beobachten Sie den Fuß während der Anwendung und holen Sie in jedem Fall den Rat Ihres Arztes oder Podologen ein. Der Halter kann Reibungen zwischen den beiden Zehen hervorrufen. Diabetikern, die an einer Neuropathie leiden, wird empfohlen, diese Lösung nicht zu verwenden.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen.



LOT siehe Verpackung.