

RUHEBANDAGE DAUMEN

IMMOBILISERT UND ENTLASTET DEN DAUMEN



ERGONOMISCHE SCHNITTFORM
 > Optimale Anpassung an die Morphologie.

WEICHER UND DÜNNER STOFF
 > Komfort und Evakuierung von Schweiß.



ANATOMISCHE VERSTÄRKUNGEN
 > Immobilisierung des Daumens in der Ruhestellung.

BAND MIT KLETTVERSCHLUSS
 > Anpassen der Bandage um das Handgelenk.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Nachts oder in allen Situationen, in denen Sie den Daumen nicht benutzen, hilft das regelmässige Tragen der EPITACT® Ruhebandage Gelenkschmerzen am Ansatz des Daumens zu lindern und trägt dazu bei, das Voranschreiten der Rhizarthrose zu verringern.

GEGENANZEIGEN:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Im Falle eines starken Ödems: beobachten Sie die Hand während des Tragens der Bandage. Ziehen Sie sie aus, wenn die Spannung zu stark ist und die Durchblutung hemmt. Bestehen Zweifel, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Keine Creme auftragen vor dem Anziehen der Bandage.

Nicht neben einer Flamme oder einem glühenden Gegenstand benutzen.

EIGENSCHAFTEN:

Die EPITACT® Ruhebandage immobilisiert den Daumen im Ruhezustand, indem die Kommissur zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen geöffnet wird. Die Ausrichtung der Knochen verringert den Druck, der auf das Daumensattelgelenk ausgeübt wird und lindert somit den Schmerz.

ERGONOMIE:

Dank der vorgeformten Verstärkungen, die sich perfekt an die Form Ihrer Hand anpassen, gibt die Ruhebandage Ihnen einen optimalen Komfort. Durch ihre Leichtigkeit und die Dünne, vergessen Sie sie beim Tragen.

TIPP:

Als Ergänzung zur Ruhebandage Daumen empfehlen wir Ihnen, die flexible EPITACT® Daumenbandage zu tragen – in allen Situationen, in denen Sie Ihre Hand benutzen möchten.

PFLEGE:

Handwäsche, mit einer sanften Seife ohne Wasch- oder Bleichmittel. Gut auswaschen. Auswringen mit etwas Druck. Zum Trocknen nicht einer direkten Wärmequelle aussetzen (Heizung, Sonnenstrahlen). Keinen Fleckenentferner benutzen.

ZUSAMMENSETZUNG: 57% Textil (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 43% thermoformierbares Plastik.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm unterbreitet. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die massgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2017.




Handwäsche.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.

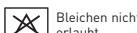

Bleichen nicht erlauben.



Nicht im Trockner trocknen.



Siehe Verpackung.

Produkt aus der MILLET Innovation Forschung.

MILLET Innovation - Z.A. Champgrand
 26270 Loriol/Drôme - FRANKREICH

MILLET
 INNOVATION

www.uhlmann.ch