

ORTHÈSE POIGNET RIGIDE DE REPOS CARP'IMMO™

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POIGNET



**SANGLE
AUTO-AGRIPPANTE**
> Ajustement de l'orthèse
autour du poignet.

**TISSU FIN
ET DOUX**
> Confort
optimal.



**RENFORTS
ANATOMIQUES**
> Immobilisation
du poignet en
position neutre.

INDICATIONS :

Durant la nuit ou dans toutes les situations où vous n'utilisez pas votre main, le port régulier de l'orthèse de repos CARP'IMMO™ est préconisé en cas de syndrome du canal carpien, de troubles musculo-squelettiques, d'inflammations ou de tendinites du poignet.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse ne doit pas être mise en contact avec une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation le marquage CE. En cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent.

SPÉCIFICITÉS :

Très légère, l'orthèse EPITACT® s'adapte à votre poignet pour la maintenir confortablement en position neutre grâce à ses renforts anatomiques semi-rigides.

ERGONOMIE :

Grâce à ses renforts développés pour s'adapter parfaitement à la morphologie de votre main, l'orthèse CARP'IMMO™ vous offre un confort optimal. Légère et ultrafine, elle se fait oublier lorsque vous la portez même pendant votre sommeil. L'orthèse s'ouvre largement pour faciliter le passage de la main. La sangle de serrage permet un ajustement homogène de l'orthèse autour de votre poignet.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

COMPOSITION : 59% textile (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 41% Thermoplastique élastomère.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2018.



Lavable
à la main.



Pas de repassage,
ni de vapeur.



Pas de
nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage
en machine.



Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.com